


特許出願中

クリアフェイスガード

# CLEAR FACE GUARD




表面に曇り止め加工  
マスクをつけたままでも曇りを防止

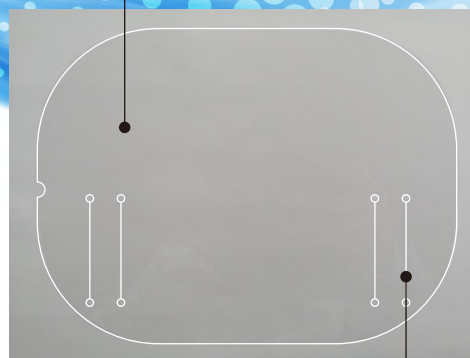

2種類の切れ込みにより  
様々なサイズのマスクに対応

- ・お手持ちのマスクに簡単に装着出来、  
眼・鼻・口を防護し感染を予防します  
(本製品にマスクは付属していません)
- ・表面に曇り止め加工をしており、  
呼気などによる曇りを防ぎ、クリアな視界を保ちます

## 装着方法

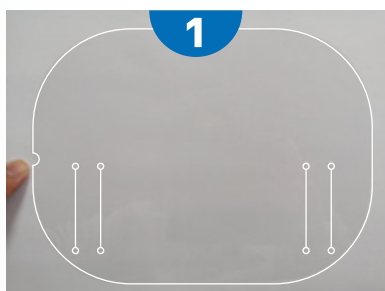

フィルム端部の半円状の  
切れ込みを左側に向けます



耳ひも(ゴム)部分を内側から  
左右の縦の切れ込みに通します



フィルム及びマスクの位置を  
調整し、十分に眼を覆う様に  
してください

■サイズ (高さmm×幅mm) **180×240**

■材質 本体: トリアセチルセルロース  
外装: ポリエチレン

MADE IN JAPAN

販売

**ユнитレンド株式会社**

〒277-0023 千葉県柏市中央2-9-16

04-7167-0501

info@unitrend.co.jp

製造元

株式会社ビッグフロント

## ご使用上の注意

- ・本製品はマスクの素材、形状によってはご使用出来ないことがあります  
(全てのマスクに対応している訳ではございません)
- ・本製品は簡易的に防護する物であり、完全に防護するものではありません
- ・着用に際しては「装着方法」を参照の上、なるべく隙間を作らないよう着用してください
- ・肌に異常を感じた場合はすぐにご使用をおやめください
- ・本製品は使い捨てですので再利用しないでください
- ・使用後は、各施設の取り決めに従い廃棄してください
- ・本製品の性質上、吸湿によりカールが発生することがありますが性能に問題はございません
- ・本製品は可燃性ですので、使用中火気には十分注意してください
- ・本製品は直射日光、高温、高湿度下の場所を避けてお子様の手の届かない所で保管してください