



ネジ不要・工具不要・穴開け不要 設置状態が一目でわかる取付確認表示器付

ちょっとした支えが欲しい、その時に。パッとつけてさっと掴まれる体位保持具

HANDY GRIP

ハンディグリップ


実用新案登録済(登録第3151772号)



ご自宅や
旅先のお風呂に



車窓の
内側に

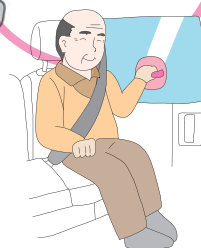

ALL 4 COLORS



そのほか、開きづらくなった窓ガラスの開閉補助など使い方は色々。使い方ひとつでちょっとした不自由が自由に変わります。

■取り付けできる場所

ガラスや浴槽の内側など、ざらつきや凹凸がないツルツルした面に取り付けられます。わずかな湾曲には取り付けできますが、湾曲の強さによっては吸着力の低下につながりますので、ご注意ください。

■注意事項

- この商品は手すりではありません。立ち上がりの動作等にはご使用にならず、体の安定を保つ目的でご使用ください。
- 木、クロス、防滴加工した表面等には取り付けできません。
- ほこり、油分、水あか、洗剤の残り等の付着がある面には、取り付けができません。吸着力が強いので、取り付け面が吸着に耐えられる強さである事を確認して下さい。
- 車内では使用時にのみ取り付けして下さい。取り外した後も高温の車内に放置しないで下さい。
- 同梱の取扱説明書を必ずよくお読みの上、安全に注意してご使用ください。

ハンディグリップ (HG-001) 仕様

サイズ 18×13.8×13.3cm

質量 約440g

材質 本体、レバー (ABS) 吸盤 (PVC)
垂直方向 52kg

引張強度 (試験値) 水平方向 30kg (取付確認表示器方向)
水平方向 23kg (設置レバー方向)

生産国 中国



ユнитренд株式会社

UNITREND CORPORATION

04-7167-0501

<http://www.unitrend.co.jp>

2013年6月現在。デザインは予告なく変更になる場合があります。