

ユニットイレ・安心

オススメポイント

- 1.アルミ製だから軽いし水洗いもできる
- 2.折りたたみ式だから使わないときも場所をとらない
- 3.組み立てに工具を一切使わないから誰でも簡単に使える



組み立て方法

STEP1



折りたたんだ状態

STEP2



脚を広げて

STEP3



便座の支えを組み合わせ

バケツを掛けて便座を下ろせば完成

- 寸法
使用時
幅 530mm
奥行 440mm
座面高さ 400~500mm
(5段階調節可能)
- 折りたたみ時
幅 530mm
奥行 780mm
高さ(厚さ) 180mm
- 重量 約4Kg(アルミニウム製)
- 付属品 ポリバケツ、ユニパックサンプル
- 耐荷重 約150Kg
- 材質 便座、便座蓋:ポリプロピレン

**ポータブルトイレを楽して清潔に!
汚物処理袋「ユニパック」(別売)**



ユニパック1枚で成人1日分(約1,500cc)の吸水が可能です。
毎日のご使用はもちろん、介助者不在時だけのご使用も大変便利です。

組立て(折たたみ)の際、指等を挟まないよう注意してください。



ユニット株式会社
UNITREND CORPORATION
 04-7167-0501
<http://www.unitrend.co.jp>