

ストッパー付回転座面で浴槽の出入り楽々

回転バスボード

極楽



BBK-002

ストッパー解除レバーを押して座面を回転、座りながら浴槽の出入りができます。
90度毎にストッパーが効くので安定して座面への乗り降りができます。
利用者や介助者の都合に合わせて、レバーの位置は座面の前後左右どこにでも配置できます。

商品名	回転バスボード 極楽
品番	BBK-002
TAISJ-ド™	01072-000029
JANJ-ド™	4562192571448
商品寸法	56.2×42.4×48(H)cm
希望小売価格	40,000 円 (税別)

ストッパー解除レバーは、座面の前後左右どこにでも位置できます。




座面後ろ側にした場合



座面左側にした場合

ストッパー解除レバーを押すと座面の固定が解除されて回転できます。
(左右どちらの方向にも 360 度回転できます。)

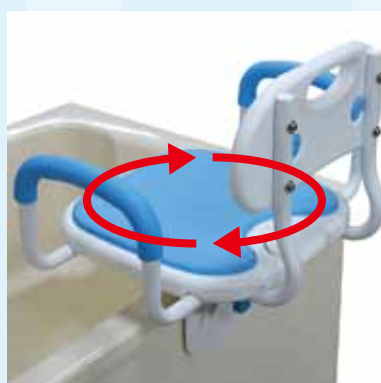

特許

独自開発のクランプ構造で浴槽への
付け外しが格段に楽になりました。



ネジ解除レバーを操作するだけで、締め付けネジ
をたくさん回さなくても付け外しが可能！


ユニトレンド株式会社
〒277-0023 千葉県柏市中央 2-9-16
TEL:04-7167-0501

2019年3月現在の情報です。デザインや仕様が変更される場合がありますのでご了承ください。


使用方法

※ご自身での動作が困難な場合、介助者の付き添いが必要です。
床面に足がしっかりとつかない場合は、台などを利用して下さい。


1. 座面中央に腰掛けます。

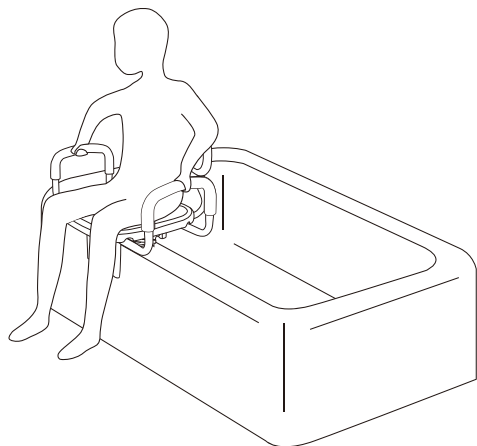


2. 固定解除レバーを押し、座面を回転させます。(90度毎に固定できます)

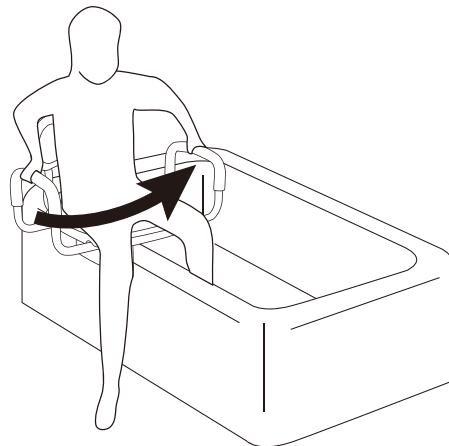

3. 180度回転し、浴槽に両脚を入れます。

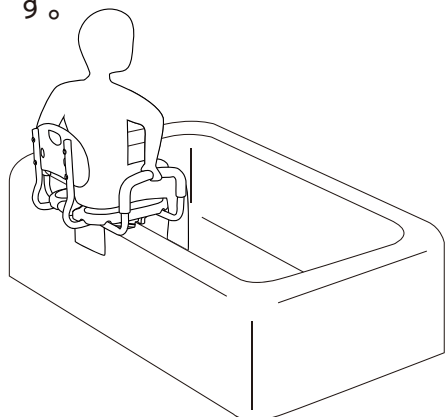


4. ゆっくりと腰を下ろし、お湯につかります。

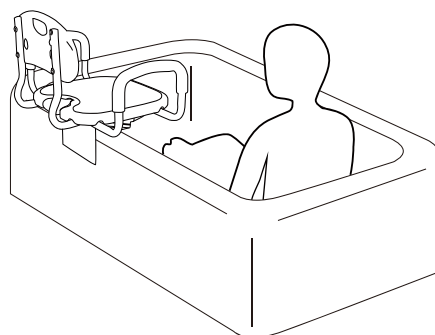

寸法

使用前後の取り付け取り外しは、簡単に行えます

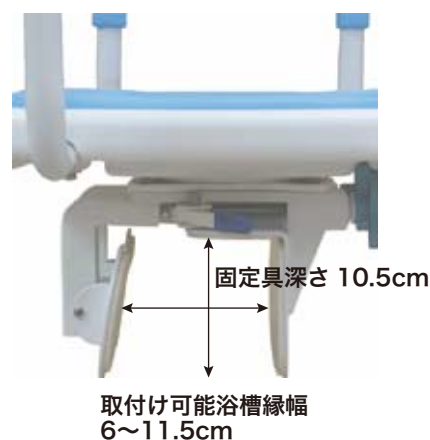

仕様

寸法	56.2×42.4×48cm (取付け可能浴槽縁幅 6~11.5cm) (背もたれ 高さ 27.7cm、グリップ 高さ 16cm、幅 3.5cm)
重量	約 6.6kg
材質	アルミ、ステンレス、スチール、ポリエチレン、EVA