

ユニットイレ・ミニ 取扱説明書

梱包内容	ユニットイレ・ミニ本体	1台
	携帯用バッグ	1個
	ユニットイレパック	5枚

商品仕様

使用時:幅	460mm	奥行	425mm	座面高	430mm
折畳時:幅	460mm	奥行	600mm	高さ	90mm

◇取扱上のご注意

組立・折り畳み時に指を挟まないよう十分ご注意ください。

※ご利用になる前に

配送の際、落下等よりふた・便座が左右いずれかにずれる場合があります。そのような場合、ふた・便座・固定具は固定しておきませんので、左右いずれかから押して微調整の上、組立してください。




組み立て方



お届け時の状態です



ふた・便座・固定具を押し出します。

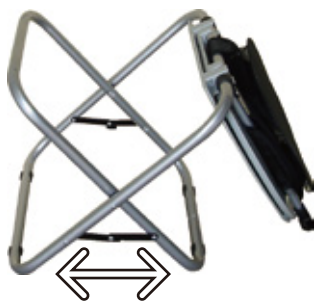

脚部を広げます



ふた・便座・固定具を前に倒して固定具を前方のパイプに挟み込みます



組立完了です

折り畳み方



←足を置きます



固定具を引き上げてパイプから外します。



ふた・便座・固定具をまとめて回転させ、下に向けます。



脚部を折ります。



ふた・便座・固定具をまとめてパイプの間に入れて完了です。

ユニットイレ・ミニのご使用方法

組立が完了しましたら、付属のユニットイレパックをユニットイレパック取付け部のメッシュ部分に被せてご使用ください。ユニットイレパックは1日で成人一日分(約1500cc)の吸水が可能です。

ユニットイレ・ミニ ユニットイレパック(吸水パック)についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。

ユニトレ株式会社 〒277-0023 千葉県柏市中央2-9-16

TEL:04-7167-0501

FAX:04-7167-0504